

vetscan

VETSCAN® FUSE Guía rápida de inicio



Precisión. Fiabilidad. Innovación. Sencillez.

zoetis.



VETSCAN® FUSE

Guía rápida de inicio

La conexión entre el consultorio y el paciente

VETSCAN® FUSE, la conexión entre el consultorio y el paciente. Un producto revolucionario que le permite a usted y a su consultorio enviar y dirigir pedidos a su laboratorio de diagnóstico VETSCAN® y obtener acceso a la información del paciente desde cualquier dispositivo de su consultorio.

Con la integración del VETSCAN® FUSE, los consultorios pueden compartir los resultados de pruebas con los dueños de mascotas y tener conversaciones significativas sobre las tendencias de múltiples resultados de pruebas de Diagnóstico Clínico.

Producto electrónico.

Características eléctricas:

- **Estación de gestión de datos, Transmisor: Marca:** ABAXIS; **Modelo:** 1300-0011; 12 V DC 5 A
- **ADAPTADOR: Puede o no venir; Marca:** ABAXIS; **Modelo:** FSP060-DIBAN2; **Entrada:** 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A; **Salida:** 12 V DC 5.0 A o **Marca:** Delta Electronics, Inc.; **Modelo:** DPS-65VB LPS; **Entrada:** 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A; **Salida:** 12 V DC 5.0 A

Almacenamiento: La temperatura de almacenamiento varía de 4 a 80 °C.

Condiciones de uso: -10 a 60 °C.

VETSCAN® es una marca registrada de Zoetis.


CONSULTE VETSCAN® FUSE GUÍA DEL USUARIO Y GUÍA DE INSTALACIÓN EN www.vetscan.mx

¡Felicidades!

Usted acaba de recibir el VETSCAN® FUSE, una innovadora solución de conectividad de Zoetis para consultorios.

INTEGRACIÓN **BIDIRECCIONAL**
FLUJO DE TRABAJO DE FUSE

Flujo de trabajo simple de 2 pasos

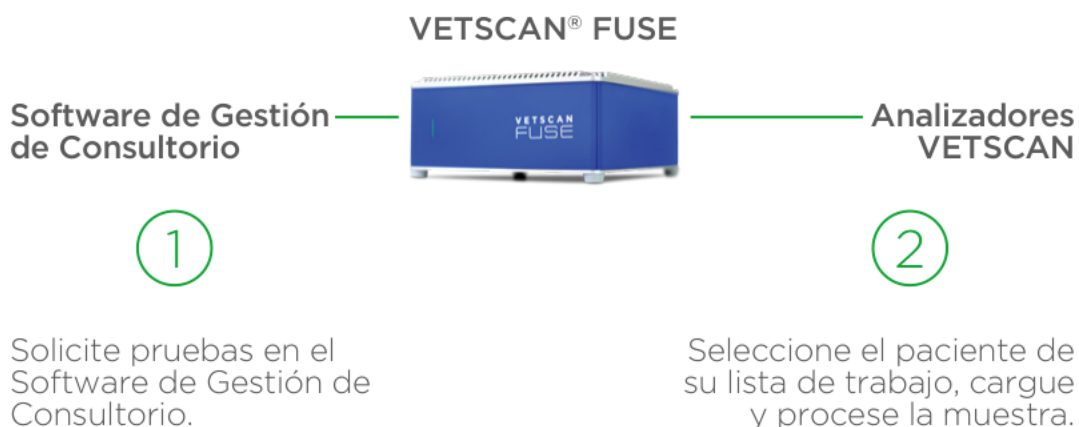

Los resultados se reciben automáticamente y se relacionan con el pedido en el Software de Gestión de Consultorio.

Flujo de trabajo simple. Sin cargos perdidos.

Favor de dejar el VETSCAN® FUSE en su caja de envío.

Su representante de Zoetis-VETSCAN® instalará el VETSCAN® FUSE e instruirá a su personal respecto a las operaciones del flujo de trabajo de VETSCAN® FUSE.

Contenido:

- 1 VETSCAN® FUSE
- 1 Adaptador
- 1 Guía rápida de inicio*

Para el correcto funcionamiento del VETSCAN® FUSE usted necesitará:

Una conexión de red en el laboratorio, cables de red (el número depende de la cantidad de analizadores que se conectarán al VETSCAN® FUSE)**, un módem switch con 4 a 8 puertos** y una memoria USB.**

Para temas relacionados con la instalación, funcionamiento y mantenimiento del VETSCAN® FUSE, favor de comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.

* Para México: La Guía del Usuario y la Guía de Instalación las puede encontrar en la página: www.vetscan.mx

** NO INCLUIDOS EN ESTE PAQUETE por lo que deben comprarse por separado. Para obtener una lista de módems switch compatibles con VETSCAN® FUSE, favor de comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.

vetscan

VETSCAN® FUSE

La conexión entre el consultorio y el paciente

EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO

No desechar los productos electrónicos en la cadena de residuos generales.

Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo a las regulaciones locales.

Utilizar sólo la fuente de alimentación y el cable suministrados cuando conecte el analizador y el módem switch.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Importado y Distribuido por:

Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60, Planta Baja,
Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

Teléfono: 55 5258 3700

Para México, visite: www.vetscan.mx

Hecho en China.